



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 16340 Bederní pás inSPORTline s elektrickým vyhřevem
SE**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
ÚDRŽBA	3
POUŽITÍ.....	4
VELIKOSTNÍ TABULKA	5
PRODUKT A DOPLŇKY	5
POWER BANKA.....	5
VÝHŘEVNÁ PODLOŽKA	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dodržujte veškerá varování a doporučení. Nedodržením se vystavujete riziku úrazu nebo poškození výrobku.
- Vyhřívaný pás používejte pouze v souladu s manuálem. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění. Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Používejte pouze originální (dodané) doplňky a náhradní díly.
- Nikdy výrobek nepoužívejte během spánku nebo ve stavu snížené vnímavosti.
- Výrobek nepoužívejte vkuse déle jak 30 minut.
- Po 30 minutách provozu power banku vypněte a nechte odpočinout 10-30 minut.
- Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Výrobek smí používat pouze dospělá osoba.
- Lidé se zdravotními komplikacemi (ochrnutí nebo snížená tepelná vnímavost) nesmí výrobek používat. Výrobek taktéž není vhodný pro těhotné ženy a diabetiky.
- Výrobek nepoužívejte, pokud inklinujete k tvrdému spánku nebo pokud jste nesoustředěný.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavin, v prostředí se zvýšenou koncentrací plynů nebo v prostředí s uskladněným kyslíkem.
- Nikdy si na výrobek nesedějte příliš prudce. Nevytvírejte na něj ani přílišný tlak.
- Během použití nebo balení výrobek neohýbejte a nepřekrucujte.
- Nepoužívejte kovové komponenty, abyste si nepřivodili úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky. Výrobek pravidelně kontrolujte co do poškození nebo opotřebení. Poškozený nebo opotřebovaný produkt nikdy nepoužívejte.
- Před zahájením používání pásu věc konzultujte s lékařem. Pokud během používání pocítíte komplikace nebo nevolnost, okamžitě přestaňte pás používat.
- Výrobek není určen lidem s akutními poraněními, trpících krvácivostí nebo otoky.
- Nikdy si na výrobek nesedějte nebo nelehejte příliš tvrdě. Vyhněte se také jakýmkoliv prudkým tlakům na pás.
- Pokud je zařízení v provozu, nepřekrývejte ho žádnou izolační pokrývkou.
- Pravidelně si kontrolujte vyhřívané oblasti, abyste předešli popáleninám.
- Používejte pouze správný zdroj napájení. V případě použití jiného zdroje by dobíjení i napájení nemuselo mít ten správný efekt.
- Produkt není určen k terapeutickým účelům a jeho použití nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

ÚDRŽBA

- Nejprve vyndejte vyhřívaný panel z pásu.
- Krátkodobé praní v pračce ve studené vodě a ve standardním režimu.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku.
- Nikdy neperte vyhřívaný panel. Smí se pouze otřít vlhkým hadříkem. Konektor musí být chráněn před vodou a vlhkostí.

	Nesmí se žehlit.
	Praní v pračce při max. teplotě vody 30°C.
	Nesmí se bělit.
	Nesušit v bubnové sušičce.
	Nesmí se chemicky čistit.

POUŽITÍ

- Vložte výhřevný panel do pásu tak, aby šedá plocha směřovala vzhůru. Poté panel propojte s power bankou.
- Zapněte power banku a prověřte, zda bateriová indikační kontrolka pracuje. Power banku poté uložte do kapsy na vnější straně pásu.
- Pás přiložte k tělu. Šedá plocha musí být proti místu, které hodláte nahřívat.
- Upravte upnutí pásu. Neutahujte příliš těsně, abyste neomezili průtok krve.
- Při správném použití by mělo dojít k zahřátí požadovaných tělesných partií a také k optimalizaci krevního oběhu.

	Břišní partie
	Ramena
	Kolena
	Kotníky
	Bedra

VELIKOSTNÍ TABULKA

S	24"~30"
M	28"~36"
L	34"~42"

POZNÁMKA: Zvolte vhodnou velikost s ohledem na tělesné proporce.



Kapsa pro Power banku

PRODUKT A DOPLŇKY

		
Pás	Výhřevný polštářek	Power banka s kabelem




POWER BANKA

Kapacita	2200 mAh
Příkon	5V 1A
Výkon	5V 1A
Rozměry	92*25*25 mm
Hmotnost	0,0625 g

VAROVÁNÍ!

- Dobíjecí doba: 4 hod. (5V 1A).
- Dobíjecí cykly: více než 300
- Pracovní teplota: -5°C - 35°C
- Power banku nedemontujte a chraňte ji před tekutinami.
- Neponořujte ji do vody.
- Chraňte před extrémními teplotami.

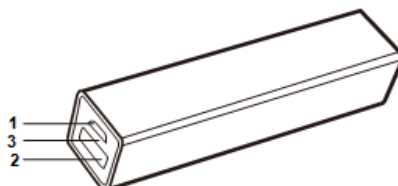

1) Vstup: pro dobíjení

2) Výstup: pro výhřevnou podložku

Napájení se samo zapne/vypne, pokud zapojíte/vypnete výhřevnou podložku.

Pokud podložku nepoužíváte, nenechávejte ji zapnutou.

3) Světelná indikace

A) Nabíjení: červené blikání

B) Plné nabití: kontinuální červené světlo

C) V provozu: kontinuální modré světlo

VÝHŘEVNÁ PODLOŽKA

5V Výhřevná podložka z uhlíkových vláken

- Nekovová vodivá vlákna, vyrobená za vysoké teploty a pod tlakem.
- Zapojení spustí uvolňování tepla.
- Pracovní teplota: 5 VDC
- Elektrická impedance: 10+/-1,5 ohm
- Jmenovitý proud: 0,5 A
- Napájení: 2,5 W



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: