


W-TEC

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Bez ohledu na použití, výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za porušení zákonů jako například řízení pod vlivem alkoholu.
- Výsledky jsou pouze orientační a neslouží jako kritérium povolení různých činností.
- Napájení: 3x 1,5V AAA alkalické baterie

Alkohol tester W-TEC Sektor

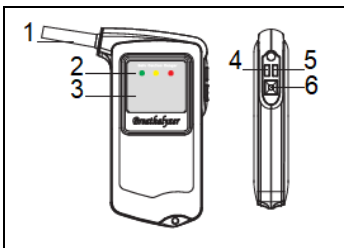

1.	Náustek
2.	Barevné ukazatele
3.	LCD displej
4.	Levé tlačítko
5.	Pravé tlačítko
6.	Vypínač

FUNKCE

Přesný a citlivý senzor

Velký LCD displej s ukazateli



5 jednotek: %BAC, ‰BAC, g/l, mg/l, mg100ml

Hlasitý alarm

Automatické vypnutí

SPUŠTĚNÍ / VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko napájení po dobu 1 vteřiny

	
Spuštěno	Vypnuto

Výsledky se objeví po 15 vteřinách.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 vteřin.



POZNÁMKA:

- BAC = obsah alkoholu v krvi
- BrAC = obsah alkoholu v dechu

TEST

Stiskněte tlačítko vypínače po dobu 1 vteřiny, ozve se zvukový signál.

Na displeji se zobrazí 0-0-0-0.


	
Načítání	Foukejte

Po načtení bude blikat „bLO“ a zelené světlo. Zhluboka se nadechněte a dýchejte do náustku po dobu asi 4 vteřin.

Zobrazí se výsledky v nastavených jednotkách:

Bude svítit zelené světlo a zvukový signál bude pomalý

- < 0.020% BAC
- < 0.200‰ BAC (nebo 0.200 g/l)
- < 0.100mg/l (BrAC)
- < 20mg/100ml

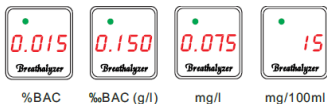

%BAC

‰BAC (g/l)

mg/l

mg/100ml


Bude svítit žluté světlo a zvukový signál bude rychlejší

$\geq 0.020 < 0.050\%$ BAC

$\geq 0.200 < 0.500\%$ BAC (nebo 0.500g/l)

$\geq 0.100 < 0.250$ mg/l BrAC

$\geq 20 < 50$ mg/100ml

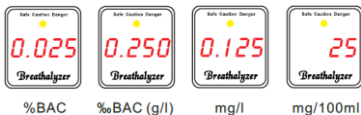

%BAC

‰BAC (g/l)

mg/l

mg/100ml


Bude svítit červené světlo a zvukový signál bude rapidní

$\geq 0.050\%$ BAC

$\geq 0.500\%$ BAC (nebo 0.500g/l)

≥ 0.250 mg/l BrAC

≥ 50 mg/100ml

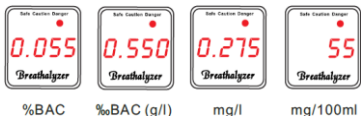

%BAC

‰BAC (g/l)

mg/l

mg/100ml

Poznámka: Displej zobrazuje „bLO“ jakmile je připravený na detekci, během detekce alkoholu displej zobrazuje odpočet 04-03-02-01, pokud displej zobrazuje odpočet i bez dýchání do náustku, znamená to, že je v přístroji zbytkový alkoholový výpar.

Opakujte testování, dokud není výsledek 0 a výpary se nevypaří.

ZMĚNA JEDNOTEK

Stiskněte pravé tlačítko, zobrazí se „100, 1000, BrAC, CN“, v nabídce se navigujte pomocí levého tlačítka, pravým tlačítkem potvrdíte výběr.

Pokud není provedena žádná změna po dobu 20 vteřin, tester se vrátí do načítacího režimu.

100	%BAC
1000	‰BAC (g/l)
BrAC	mg/l (BrAC)
CN	mg/100 ml



%BAC



‰BAC (g/l)



mg/l



mg/100ml

Pokud je nízký stav baterie, displej zobrazí „LLLL“, rozsvítí se červené světlo a ozve se 5x zvukový signál.

Technické parametry:

Rozsah:	0.000-0.199 %BAC
	0.000-1.990 ‰BAC (nebo 1,990 g/l)
	0-000-0,995 mg/l (BrAC)
	000 – 199 mg/100ml
Bod upozornění:	0,050 %BAC
	0,500 ‰BAC (nebo 0,500 g/l)
	0,250 mg/l (BrAC)
	50 mg / 100 ml
Přesnost:	C (koncentrace alkoholu pro bod upozornění)

±0,010 %BAC

±0,100 ‰BAC (nebo 0, 100 g/l)

±0,05 mg/l

±10 mg

Čas odezvy: < 5 s

Doba načtení: < 30 s

Napájení: 3x 1,5V AAA alkalické baterie

Napětí: ≤120 mA

Provozní
teplota: -10°C + 50°C

Displej: Displej s 3 LED ukazateli

Jednotky běžné pro státy / kontinenty:

Mg/100 ml – Čína; g/l – Evropa; %BAC – USA; mg/l BrAC -
Japonsko