



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 30614 Mechanický skládací sportovní invalidní vozík inSPORTline Brenstark odlehčený



Obrázky v manuálu jsou pouze ilustrační, finální zpracování produktu se může drobně lišit.

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

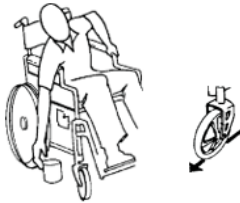
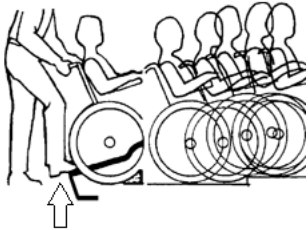
OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ	4
NASTAVITELNÉ ČÁSTI	4
Poznámky	6
ÚDRŽBA	6
SPECIFIKACE	7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Nedodržení instrukcí a varování může vést k poranění, poškození majetku nebo smrti.
- Na stabilitu vozíku má vliv stav předních a zadních koleček, stejně tak uživatel.
- Nejezděte do kopce nebo z kopce o náklonu větším jak 10°.
- Nepoužívejte pro přesun na veřejných motorových komunikacích.
- Nejezděte přes překážky jako jsou obrubníky nebo mezery. Vozík se může překlomit.
- Na vozík si nestoupejte.
- Nepoužívejte opěrky nohou jako platformu. Při sesedání se ujistěte, že jsou opěrky složeny.
- Při přesunu vždy uchopte madla na kolech. Nechtejte přímo kola.
- Nepoužívejte další neschválení příslušenství nebo doplňky.
- Teplota vozíku se může zvýšit, pokud je vozík vystaven externím zdrojům tepla (sluneční svit).
- Používejte vozík pouze pro účely, za jakými byl vyroben.
- Prodejce nebo výrobce není odpovědný za úrazy nebo poškození majetku z důvodu nesprávného použití vozíku.
- Uživatel a asistent musí být poučení o správném použití.
- Držte končetiny a tělo, aby nepřesahovaly vozík.
- Držte těžiště ve středu sedadla. Vždy sedte vzpřímeně a nepředklánějte se.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů a nastavitelných částí. Nikdy vozík nezvedejte za nastavitelné části.
- Pravidelně kontrolujte stav vozíku, opotřebený nebo poškozený vozík nepoužívejte.
- Při přejezdu přes překážky nebo hrany dávejte pozor, aby se vozík nepřeklopil. Nikdy vozík nenechávejte váhou přepadnout.
- Při použití výtahu dbejte na nosnost a typ výtahu.
- Vozík nezvedejte, pokud v něm sedí osoba. Hrozí riziko úrazu.
- Pokud je potřeba přesunout osobu z vozíku na jinou plochu, pokuste se co nejvíce snížit vzdálenost mezi oběma místy.
- Při přesunu osoby z vozíku nezapomeňte vozík řádně zajistit.
- Držte končetiny a části těla mimo pohyblivé části.
- Vozík je určen pro převoz jedné osoby současně.
- Jakoukoliv opravu, údržbu nebo čištění provádějte pouze tehdy, je-li vozík prázdný.
- Nastavitelné části a spoje nepřetahujte. Můžete tak poškodit rámy a závity.
- Nastavitelné části musí jít upravovat bez potřeby náradí.
- Pro opravu používejte pouze stejné originální náhradní díly.
- Pokud se na vozíku objeví ostré hrany, okamžitě přestaňte vozík používat, dokud se poškození neopraví.
- Nosnost: 100 kg

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

		
Nenaklánějte se mimo hranu vozíku pokud. Pokud je to nezbytně nutné, zajistěte kolečka.	Nenaklánějte se dozadu, můžete změnit těžiště a převrhnout se.	Při přejezdu přes překážku nahněte vozík sešlápnutím rámu.

NASTAVITELNÉ ČÁSTI

Stiskem konce osy zadních kol odejmete nebo nasadíte zadní kola.	
Pomocí imbusového šroubu nastavíte výšku zadních pojistných koleček. Po změně nezapomeňte kolečka opět zajistit.	
Pro změnu polohy prostředního rámu povolte imbusové šrouby a posuňte rám. Poté opět zajistěte pomocí šroubů.	

Pomocí šroubů na opěrci nohou můžete nastavit úhel opěrky nohou. Poté opět zajistěte pomocí šroubů.



Pomocí šroubů na rámu opěrky nohou můžete nastavit výšku opěrky nohou. Poté opět zajistěte pomocí šroubů.



Pomocí přezek můžete upravit polohu madel pro tlačení.



Pomocí přezek můžete nastavit polohu jistících koleček dopředu / dozadu.



Pomocí přezek můžete nastavit polohu brzd dopředu / dozadu.

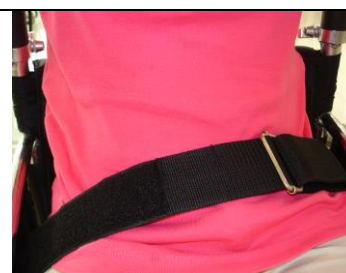


Poznámky

Před použitím zkontrolujte polohu jisticích koleček. Před tlačáním je nastavte tak, aby nebránily pohybu.



Vždy používejte pás.



Zkontrolujte dotažení nastavitelných částí.



ÚDRŽBA

- Pro čištění používejte pouze jemné čisticí prostředky a vlažnou vodu. Poté řádně osušte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, bělidla apod.
- Udržujte kolečka čistá. Nečistoty mohou brzdit nebo zcela zastavit jejich pohyb.
- Pravidelně promazávejte všechny pohyblivé části.
- Písek, slaná voda nebo sůl mohou poškodit kovové části, ložiska a další pohyblivé části, případě způsobit korozi kovových částí.
- Pravidelně kontrolujte stav všech pohyblivých spojů v případě potřeby kontaktujte servisní oddělení.

SPECIFIKACE

Část vozíku	Rozměr
Celková délka	85 cm
Celková šířka	58 cm
Celková výška	80 cm
Rozložená šířka	35 cm
Složená šířka	36 cm
Hloubka sedadla	36 cm
Výška od sedadla k zemi	48 cm
Výška od nášlapu k zemi	5-10 cm
Výška opěradla	27 cm
Průměr předních kol	10 cm
Průměr zadních kol	60 cm
Max. nosnost	100 kg
Čistá hmotnost	10 kg

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštíků, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

